

# NOCOMAX Easy®

Notre gamme de produits s'utilise également avec le **Nocomax Easy®**, appareil permettant de traiter des volumes de 500 à 20 000 m<sup>3</sup>.



## UN FONCTIONNEMENT TRÈS SIMPLE

Simple d'utilisation : programmation du volume de la pièce par Touchpad et affichage leds.

Simple de manipulation : facilement déplaçable grâce à ses roues.

Très faible quantité de produit nécessaire : 1ml de produit suffit pour traiter 1m<sup>3</sup>.

Aucune préparation nécessaire avant le traitement (à l'exception du nettoyage) ni intervention après le traitement (nul besoin d'essuyer ou d'aérer).

Extinction des leds au fur et à mesure du traitement. Le **Nocomax Easy®** indique également si le traitement s'est déroulé normalement ou si un dysfonctionnement est arrivé.

Traitement en 2 phases : Temps diffusion du **Nocomax Easy®** et temps de contact du produit.

Arrêt automatique.

Exemple d'application : traitement préventif d'un local de 5000 m<sup>3</sup> :

- Temps de diffusion : 50 min
- Temps de contact : 60 min
- Durée totale de la désinfection : 110 min

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Turbine électrique : 2 000 Watts.

Vitesse de rotation : 22 000 tr/min.

Vitesse de sortie du brouillard : 80 m/sec

Poids à vide : 49 kg.

Possibilité de traiter des volumes de 500 à 20 000 m<sup>3</sup>.

Voltage disponible : 230 V.

Fabrication française ISO 9001.

1

Placer le Nocomax Easy au centre de la pièce à traiter et mesurer le volume (Volume=hxLxl).



2

Brancher l'appareil et allumer l'interrupteur principal.



3

Vérifier que la quantité de produit est suffisante. Dans le cas d'un traitement insecticide, appuyer également sur le bouton .



4



Régler le volume de la pièce à l'aide du Touchpad sensible.



5

Appuyer sur le bouton de démarrage. Un signal sonore se déclenche pendant 30 secondes. Profiter de ce temps pour sortir de la pièce.

Attendre le temps de diffusion et le temps de contact pour entrer de nouveau dans le local.

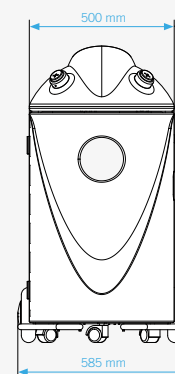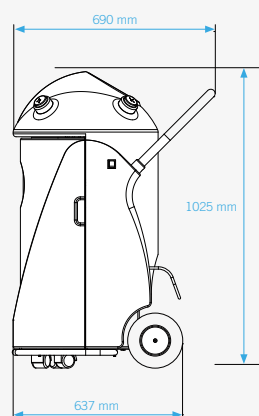

oxypharm®

917 rue Marcel Paul  
94500 Champigny-sur-Marne

Tel +33 (1) 48 82 58 29

Fax +33 (1) 48 82 46 13

Email commercial@oxypharm.net

[www.oxypharm.net](http://www.oxypharm.net)